



Expert 3D^{PRO}



Expert 3D^{PRO}

Extractor de leche eléctrico



Manual de uso

Fig. 1


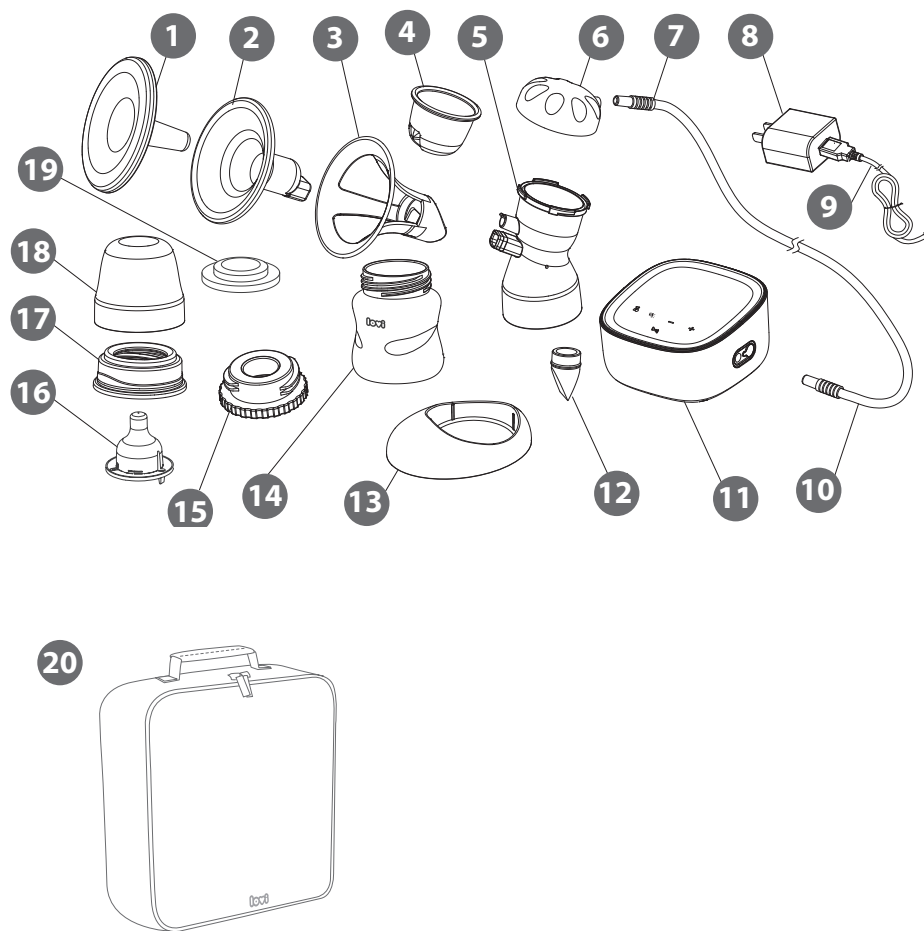


Fig. 2



Canpol sp. z o.o.
02-884 Warszawa,
ul. Puławska 430, Poland.
Biuro, sprzedaż:
Słubica B, ul. Graniczna 4,
96-321 Żabia Wola, Poland.
tel. (+48 46) 858 00 00,
fax: (+48 46) 858 00 01
biuro@lovi.pl
www.lovi.pl

ISO 9001, ISO 22716

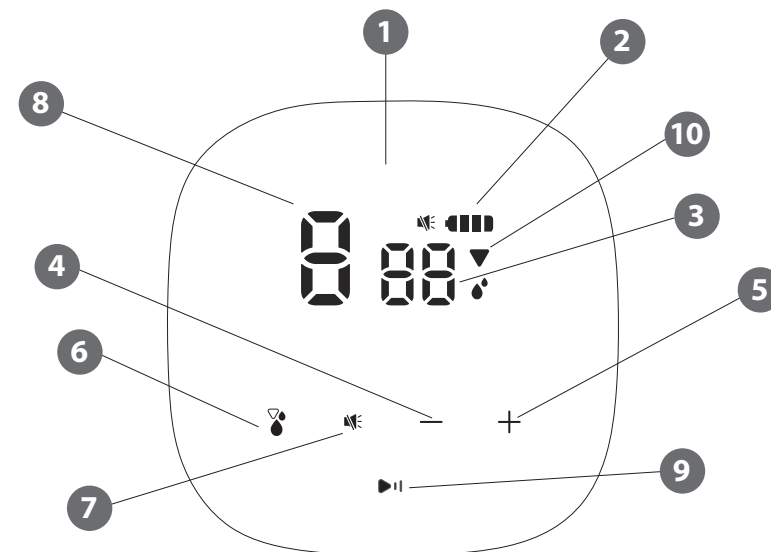

Designed and approved in EU.
Zaprojektowano i zatwierdzono w UE.
Разработано и протестировано
в Европейском союзе.

m001

KASUTUSJUHEND

LOVI Expert 3D Pro Elektriline Rinnapump

Palun lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Tähtis ohutusteave:


Käesoleva kasutusjuhendi ja ohutusteabe eiramine võivad tuua kaasa terviseohu ja seadme rikke. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel ja viisidel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse vastaselt tehnilistele muudatustele ajakohastada.

2. Rinnapumbal on puutekraan. Piima väljutamise alustamiseks puudutage lülitiikooni. Kuulete piiksuvat heli, mis kostab iga kord, kui juhtpaneeli seadistus muutub (joon 2).
3. Samal ajal alustab pump 30 minuti loendamist. Kui taimer on loendanud 30 minutit, lülitub mootor välja. Kui puudutate piima väljutamise ajal toitelüliti ikooni, lülitub pump välja. Teistkordse puudutuse järel alustab seade uuesti loendamist. Rinnapump käivitub ja alustab tööd stimuleerimisfaasis esimesel võimsustasemel.
4. Stimuleerimisfaasi imemistugevuse reguleerimiseks vastavalt oma vajadustele puudutage pluss- (+) või miinusmärgiga (-) ikooni.
5. Kui soovite alustada väljutamise faasi, vajutage nuppu 6, joon 2.
6. Imemistugevuse reguleerimiseks süvaväljutusfaasis puudutage pluss- (+) või miinusmärgiga (-) ikooni. Süvaväljutusfaasist tagasi stimuleerimisfaasi minekuks puudutage juhtpaneelil uuesti sama nuppu (6), joon 2.
7. Stimuleerimis- ja väljutamise faasis on võimalik valida üheksa režiimi vahel.
8. Kui soovite stimuleerimisfaasi vahele jätta või kui piim hakkab varem voolama, puudutage faasi muutmiseks nuppu nr 6 (joon 2).
9. Kui olete lõpetanud, puudutage toitelüliti ikooni ja rinnapump lülitub välja.

HOIATUS! Enne rinnapumba rinnalt eemaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud. Vajadusel saate rinnapumba pumpamise ajal kõrvale panna, kui lükkate sõrme massaažipadja ja rinna vahele (nii, nagu teete last rinnalt eemaldades).

HOIATUS! Rinnapump lülitub 30 minuti möödumisel automaatselt välja, olenemata sellest, kas seda on pumpamise ajal seadistatud.

REŽIIMILÜLITI

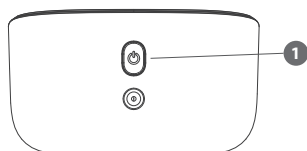

Seadme sisselülitamiseks ühendage see toiteallikaga ja vajutage nuppu nr 9 (joon 2). Rinnapump alustab tööd esimesel tugevusastmel – vaikeseadel. Aku töö alustamiseks vajutage pealüliti (1), kui seade on vahelduvvoolu toitest lahti ühendatud. Vajutage ja hoidke hetkeks nuppu 9 (joon 2) rinnapumba töö alustamiseks.

IMEMISTUGEVSUS

Kui lülitate rinnapumba välja ja taaskäivitate, alustab see tööd stimuleerimisfaasi esimesel tugevusastmel. Kui piima hakkab sattuma massaažipadja alla, vähendage imemistugevust, kuni piim hakkab uuesti pudelisse voolama.

SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid LOVI Expert 3D Pro elektrilise rinnapumba ostmise puhul! See revolutsiooniline rinnapump ja tõeline ekspert pakub asjatundlikku tuge imetamisprobleemide lahendamisel.

Tänu 3D-lehtrile, mis imiteerib loomulikku toitmist, on see rinnapump murranguline lahendus. 3D-lehter erinevalt klassikalistest lehtritest mitte ainult ei ime, vaid ka surub rinnanibu. Lehter ümbritseb rinnanibu ja surub rinda ühtlaselt, töötades samaaegselt mitmes mõõtmes, tänu millele matkib seade täpselt beebi tegevust rinnapiima imemisel. Ühtlane ja õrn rõhk stimuleerib piimatootmise eest vastutava hormooni prolaktiini vabanemist, põhjustades piima kiiret ja loomulikku väljavoolu ilma ebamugavustundeta.

Expert 3D Pro Elektriline Rinnapump lahendab ja aitab vältida levinumaid laktatsiooniprobleeme, näiteks:

- valulikud rinnanibud,
- piimapais,
- piimastaas,
- mastiit (rinnapõletik)

ja stimuleerib kiiresti piimatootmist pärast keisrilõiget.

LOVI Expert 3D Pro Rinnapump on:

- väga efektiivne – 3D lehtrihooldik suurendab nibule avaldavat rõhu kontrolli;
- mugav – võimaldab teil piima väljutada isegi lamavas asendis, mis on mugav pärast keisrilõiget;
- kahe faasiline – kahe faasiline rinnapump peegeldab imiku loomulikku imemisrütmi: stimuleerimisfaas imiteerib imiku kiireid imemisliigutusi, stimuleerides piimatoodangut; väljutamise faas peegeldab aeglasemat, sügavamat ja tõhusamat imemist.

LOVI Expert 3D Pro Rinnapump on rasketel aegadel äärmiselt efektiivne.

MÄRKUS: LOVI bränd soovib imetamist kui kõige tervislikumat imikute toitmiseviisi. Alternatiivset toitmismeetodit soovitame kasutada hakata alles siis, kui rinnaga toitmine on võimatu või ebapiisav ning alles pärast arsti, ämmaemanda või apteekriga konsulteerimist.

Rinnapiim on vastsündinutele ja imikutele kõige tervislikum ja väärtuslikum toit. Seda soovitatakse ainsa toiduna, mida anda beebile esimesel kuuel elukuul. Kuue kuu pärast tuleb seda kombineerida tahke toiduga.

MÄRKUS! Rinnapumpa kasutatakse liigse piima väljapumpamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks siis, kui nälgjane laps ei saa rinnast piima kätte, st kõigil juhtudel, kui teie piimakanalid on blokeeritud.

KASULIKUD NÕUANDED

Millal tuleks rinnapumba kasutada?

- Võimaluse korral oodake, kuni laktatsioon on alanud, see juhtub tavaliselt 2-4 nädala jooksul peale sünnitust. Selle reegli eranditeks on:
- Sinu rinnad toodavad liiga palju piima, need on paistes ja kõvad (piima täis rinnad). Enne imetamist või imetamise ajal väikse piimakoguse välja pumpamine pakub teile leevendust ja aitab lapsel rinnast piima imema hakata;
- Nibud tõmbuvad sisse, kuna imetamise vaheline intervall on pikk;
- Teie nibud on sissepoole pööratud, lamedad või vigastatud (piima pumpamine aitab sissepoole pööratud ja lamedaid nibusid vormida);
- Kui tunnete imetamiskordade vahel, et rinnas on palju piima, aga ei taha beebit äratada;
- Laps on haige ja ei taha rinnast süüa;
- Kui teie rinnad ei tooda piisavalt piima, võite rinnapumba kasutamise abil imetamist stimuleerida ja laktatsiooni parandada;
- Kui töötate või viibite kodust eemal ja soovite imetamist jätkata, peaksite loomuliku laktatsiooniprotsessi säilimiseks regulaarselt piima välja pumpama.

Kui sageli peaks rinnapumpa kasutama?

Kui emal ei ole ajutiselt võimalik last rinnaga toita, soovime piima välja pumbata vähemalt 8 korda päevas. See aitab laktatsiooni intensiivsuse sobival tasemel hoida. Esialgu võib suurema piimakoguse väljapumpamine raske olla, aga pumba mõnepäevase kasutamise järel suudate aina enam piima välja pumbata.

Kui laktatsioon on juba välja kujunenud, saab ühe pumpamiskorraga vähem piima (30-60 ml) ja ühe toidukorra jaoks vajaliku piima kogumiseks peate mitu korda pumpama.

TOOTEKIRJELDUS

Rinnapump, mudel nr 50/070

Elektriline rinnapump (edaspidi rinnapump) on seade, mis on mõeldud imetavatele emadele rinnapiima väljutamiseks. Võimaldab piima kogumist hilisemaks kasutamiseks, näiteks siis, kui viibite mõnda aega lapsest eemal. Rinnapump aitab laktatsiooni säilitada ja olla valmis kavandatud eemalolekuteks või ootamatuteks olukordadeks, nagu ravil viibimine või rinnanibude valulikkus ja lõhenemine.



- Seade on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.
- Seadme garantiiaeg on kaks aastat.
- Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit ja pidage kinni ohutusreeglitest.
- Hoidke kasutusjuhendit seadme juures.
- Toote oodatav kasutusiga on kaks aastat.
- Toote silikoonosade värvus võib jäävalt muutuda. Need tooteosad tuleks luitumise korral või teatud kasutusaja möödumisel välja vahetada.

Järgige seadme ja selle lisatarvikute õige kasutamise juhiseid. Ärge kunagi kasutage kahjustunud, puuduvate osadega või katkist seadet.
Kahjustunud või kulunud osad tuleb asendada kohe. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mille põhjus on kasutusjuhiste ja õige kasutusviisi eiramine. Ükski seadme väärist kasutamises põhjustatud kahjustus ei saa olla kaebuse ega garantiiremondi alus.
Seadme remontimine või ümberehitamine volitamata isikute poolt võib tühistada garantii ning sellega võib kaasneda oht elule ja tervisele.




ÜLDISED OHUTUSREEGLID

- Kui teil on rinnaga toitmisel probleeme või kui lapse imetamine tekitab valu, peaksite enne rinnapumba kasutamist meedikuga nõu pidama.
- Rinnapumba esmakordsel kasutamisel oleks seda parim teha spetsialisti jälgimisel.
- Soovitame lugeda vastavasistulist kirjandust ja tutvuda imikute toitmise põhimõtetega.

NB! Ebapiisav imemistugevus (pumpamisurve) võib vähendada väljutatava piima kogust, kuid liiga suur imemistugevus võib piima väljutamisel põhjustada rinna valulikkust ja vähendada piima teket. Kui teil tekib üks või teine nimetatud probleemidest, reguleerige rinnapumba imemistugevust (vt IMEMISTUGEVS).

- Hoidke seade puhtana. Vältige tolmu ja muu mustuse kogunemist, mis võivad toote kasutusomadusi kahjustada.
- Hügieeni eest hoolitsemine on ema ja beebi ohutuse tagamiseks hädavajalik.
- Seadme osi, mida ei ole võimalik pesta, tuleb vee ja niiskuse eest kaitsta.

TOITEVALIKUD

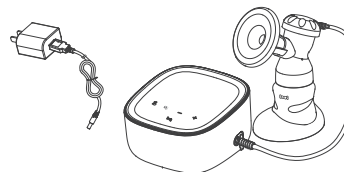

Vahelduvvooluadapteri kasutamine

sisestage adapteri otsak juhtseadmel olevasse ühenduspessa ja pistik seinakontakti.

Rinnapumbaga on kaasas 5V 1A toiteadapter. Vahelduvvooluadapteri tihvtid võivad riigiti erineda. Soovitav on kasutada rinnapumbaga kaasas olnud originaal vahelduvvooluadapterit. Kuid enamik mobiiltelefoni laadijaid on ka 5V 1A või 5V 2A. Neid saab ühendada USB-laadimiskaabliga. Kui adapter on üle 5 V, võib see toodet kahjustada. Tähtis! Enne teise adapteri kasutamist kontrollige selle pinget. Eeltoodu puudutab riike, kus on Eli adapter (komplektis) ei tööta.

Liitium-ioonaku kasutamine

Akut laetakse vahelduvvooluadapteri kasutamisel. Kasutage ainult originaaladapterit. Laadimine võtab aega umbes kolm tundi.


NB! Enne seadme esmast kasutamist laadige aku täis. Täislaetud aku võimaldab pumbal töötada umbes 2/3 tsükli. Rinnapumba kasutusea pikendamiseks laadige akut enne, kui see on täielikult tühjenenud. Kui seade on akutoitel, kuvatakse ekraanile aku laetuse tase sellisena, nagu ta ajas muutub. Aku tühjenemisel kuulete piiksuvat heli ja ikoon hakkab vilkuma. Kasutatud akut saab asendada ainult tootja volitatud teeninduskeskuses.

KASUTUSJUHE

Enne iga kasutamist:


- Peske käed korralikult puhtaks;
- Veenduge, et rinnapump on pestud ja kuivanud, kui ei, siis järgige allpool esitatud juhiseid.
- Veenduge, et silikoonvoolikus ei oleks vedelikku ega niiskust. Ärge kunagi lülitage pumpa tööle, kui märkate voolikus veejälgi. Hoiatus! Ärge puhuge vee eemaldamiseks voolikusse!

NB! Enne rinnapumba kasutamist kontrollige aku laetuse taset. Kui aku on tühi, ühendage juhtseadmega vahelduvvooluadapter ning laske aku täis laadida.

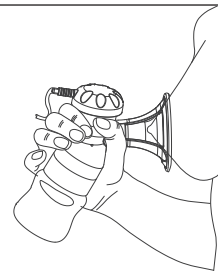


1. Asetage rinnapump rinnale nii, et rinnanibu jääb sügavale lehtri sisemusse (täpselt keskele).


NB! Silikoonpadi peab tihedalt vastu rinda liibuma: vastasel korral võib imemistugevus jääda liiga väheks.

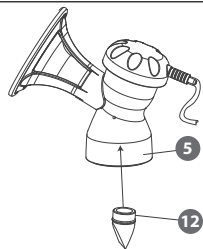


Asetage tagasivoolusulgur (12) rinnapumba korpusesse (5). Suruge alla ja veenduge, et see tihedalt kinnituks.

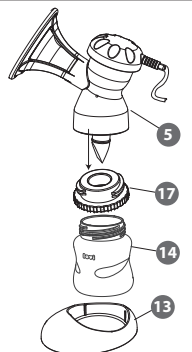

Keerake pudel (14) koos pudeli adapteriga (17) rinnapumba korpusele (5). Asetage kokkupandud seade alusele (13). Eemaldage lehtri plastkate.

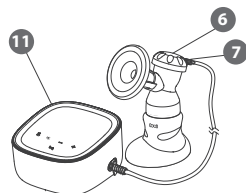

Ühendage voolik rinnapumba korpuse ja juhtseadmega. Pistke üks otsakutest (7) kaanes olevasse avasse (6) ja teine juhtpaneelil asetsevasse ühenduspesa (11). Suruge vooliku otsakuid, et nad tihedalt avadesse kinnituksid.

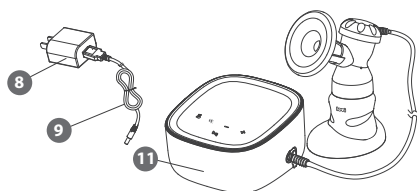

Ühendage USB-laadimiskaabel (9) rinnapumba seadmega (11) ja vahelduvvooluadapteriga (8). Ekraanil olevad LED-märgutuled vilguvad, mis tähendab, et rinnapump on ooterežiimis ja seade hakkab akut laadima.

HELI HOIATUSED

1. Iga kord, kui ükskõik millist nuppu vajutatakse teeb pumbaseade piiksvat heli.
2. Kui aku saab tühjaks, kuulete piiksu ja rinnapump lülitub 10 sekundi pärast välja.
3. Kui vajutate vaigistamisnuppu (7), lülitate helid sisse või välja.

Kõrvaolev tähis näitab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vältimaks kontrollimatust jäätmekäitlusest tekkivat kahju keskkonnale ja inimeste tervisele, käideldge toodet vastutustundlikult, aidates kaasa materjalide säästlikule taaskasutusele. Tootte ringlusevõttu puudutava info saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või toote tarnija Poole.



Tootja deklareerib, et käesolev toode vastab Euroopa Liidu direktiividele ja ühtlustatud standarditele. Toode on läbinud vastavushindamise menetluse.



Toode vastab teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete direktiivi (LVD) 2014/35/EL, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (EMC) 2014/30/EL ning elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatavate ohtlike ainete kasutusnõuete direktiivi (RoHS) 2011/65/EL sätetele.

Tegemist on II klassi seadmega.



HOIATUS! See toode ei ole mänguasi. Hoidke selle osi lastele kättesaamatus kohas! Hoidke kasutusjuhend alles, kuna see sisaldab olulist teavet. Tootte partiikood on pakendil.

TOOTE VÄÄRKASUTUS

- Ärge kasutage toodet, kui sellel on määrke kahjustustest.
- Ärge kunagi kasutage toodet vannis olles.
- Ärge kunagi kasutage toodet kohas, mis on avatud kokkupuutele veega, näiteks vanni, kraani- või pesukausi või duši läheduses.
- Ärge kasutage toodet, kui olete nii väsinud, et võite selle kasutamisel magama jääda.
- Ärge kunagi ühendage toodet vahelduvvooluadapteriga õues viibides.
- Ärge mingil juhul kasutage katkise juhtmega vahelduvvooluadapterit. Kahjustunud adapterit võib parandada ainult tootja volitatud teeninduskeskuses.
- Ärge kunagi kasutage toodet kasutustingimuste ja -otstarbe vastaselt.
- Ärge müüge kasutatud toodet edasi.

SEADME SPETSIFIKATSIOONID

Akutoide	3,7 V liitium-ioonaku, mahutavusega 2200mAh
Toide vooluvõrgust	vahelduvvool, 100-240 V / 50/60 Hz
Maksimumvõimsus	5 W

PUHASTUS- JA DESINFITSEERIMISJUHISED

Enne esimest ja enne igat kasutamist võtke rinnapump lahti. Peske kõiki rinnapumba ja pudeli komponente õrnatoimelise pesuvahendiga sooja vees, seejärel loputage hoolikalt ja desinfitseerige vastavalt allpool toodud juhistele.

Enne esmakordset kasutamist desinfitseerige kõik komponendid, mis puutuvad kokku rinnapiimaga (nr: 2, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19), pannes need 5 minutiks keevasse vette. See on hügieeni tagamiseks oluline. MÄRKUS! Ärge jätke toote osi poti põhja. Desinfitseerimise ajal segage vett, et vältida nende kahjustamist.

- Veenduge, et desinfitseerimise ajal oleksid kõik komponendid täielikult keevas vees.
- Ärge keetke osasid, millel puudub otsene kokkupuude rinnapiima ja elektriliste osadega.
- Eemaldage kõik komponendid veest kohe pärast keetmist.

Enne iga järgmist kasutamist desinfitseerige kõik ülalnimetatud rinnapumba ja pudeli osad, valades need üle keeva veega või auruterilisatoris või mikrolaineahjus steriliseerimisnõus. Selle eesmärk on tagada hügieen.

HOIATUS! Ei ole muid elemente, mida saaks mikrolaineahju sterilisatoris desinfitseerida.

- Ärge valage vett membraanikorgile (nr 6). Kui märkate vett korgi peal või sees, tõmmake pistik välja ja laske sellel kuivada, nii et vesi ei satuks torustikku ega pumbaüksusesse.
- Hoiatus! Ärge desinfitseerige silikoonitoru pistikute, lehtri, korgi ja elektriliste komponentidega. Ärge uputage neid vette. Pühkimiseks kasutage desinfitseerimisvahendit.

Pärast iga desinfitseerimist kuivatage osad enne rinnapumba kokkupanekut ja selle uuesti kasutamist põhjalikult. Selle kuivatamiseks võite kasutada puhast rätikut. Kuivatatud osi on soovitatav hoida õhukindlas anumas või kilekotis. Võite kasutada ka puhast rätikut.

Hoiatus! Osaliselt kuivad komponendid võivad kogu seadme tööd negatiivselt mõjutada, nii et enne kasutamist veenduge, et kõik elemendid oleksid korralikult kuivanud.

Pesemisejuhised:

- Piimajääkide eemaldamiseks peske toodet kohe pärast kasutamist.
- Ühendage ühendusvooliku otsakud vooliku küljest lahti. Need elemendid ei vaja puhastamist, sest silikoonmembraan kaitseb neid söögiga kokkupuutumise eest.
- Puhastage kõik rinnapumba osad vastavalt ülalmainitud juhistele.
- ÄRGE kasutage toote puhastamiseks lahusteid ega kemikaale.
- Loputage puhta, kuuma veega.
- Kui kasutate rinnapumba osade desinfitseerimiseks elektrilist sterilisatorit, järgige selle tootja juhiseid.

Silikoonist tagasilöögiklapiga massaažipatja tuleks pesta väga õrnalt ja toidul ei tohiks lasta selle pinnal kuivada.

ümarmune põhi

ots

Ettevaatust! Võtke tagasilöögiklapp alati lahti, haarates kahe sõrmega selle ümmargusest alusest. Olge ettevaatlik ja ärge haarake klapi otsast, sest see võib kahjustada struktuuri ja nõrgendada selle imemistugevust.

Hoiatus! Enne iga kasutamist kontrollige rinnapumba kõiki elemente pragude, rebenemiste, värvimuutuste või riknemise suhtes, kuna need võivad mõjutada seadme toimimist.

Kuidas lutti desinfitseerida?

Enne esimest ja enne igat kasutuskorda peske hoolikalt kõik toote osad ja desinfitseerige. Asetage keevasse vette 5 minutiks. Selle eesmärk on tagada hügieen. Puhastage enne kasutamist. Keedetud ja kare vesi võivad tekitada katlakivi. Toidujääkide eemaldamiseks peske kõik osad põhjalikult puhta veega, sealhulgas kohad, mis ei pruugi olla nähtavad, kuid võivad olla toiduga kokku puutunud. Pärast kasutamist eemaldage üleliigne toit pudelist ja lutilt, loputage, peske ja desinfitseerige auru/elektri sterilisatoriga või keevas vees. Pudelit saab pesta nõudepesumasinas (max. temp 60°C). Ei ole soovitatav pesta lutti nõudepesumasinas, kuna pesuained võivad toodet kahjustada. Ärge kasutage antibakteriaalseid aineid. Enne toote kasutamist kontrollige toodet hoolikalt ja sikutage lutti igas suunas. Eriti siis kui beebil on hambad. Esimeste kahjustuste ilmnemisel visake toode minema. Ärge pinguldage pudeli lukustamisrõngast, kuna see võib mõjutada luti ventilatsiooni. Alati kontrollige lekkeid. Ärge suurendage tila vooluauku, mis tahes viisil kuna see võib tila kahjustada. Mikrolaineahjus soojendamisel olge eriti ettevaatlik. Alati segage soojendatud toitu, et tagada temperatuuri ühtlane jaotumine, kontrollige toidu temperatuuri enne lapsele andmist. Mikrolaineahjus soojendamisel veenduge, et pudelil ei ole kaas peal. Ärge asetage toodet kuuma ahju või gaasi/elektripliidile. Ärge jätke söötmislutti päikese kätte, kuumaallika lähedusse ega desinfitseerimisvahendisse kauemaks kui ette nähtud, kuna see võib lutti kahjustada. Soovitatav on asendada lutt uue vastu pärast 2-kuulist kasutamist. Hoidke juhised alles hilisemaks kasutamiseks. Pudel on valmistatud polüpropüleenist. Partii kood on märgitud pakendil

Teie lapse ohutuse huvides: HOIATUS!

Pidev kontakt vedelikega, eriti mahlad või puuviljahapped, põhjustavad kaariese teket.

Kontrollige enne toitmist alati toidu temperatuuri.

Vähimategi rebendite või nähtava vananemise korral vahetage lutt välja.

Kui pudel ei ole kasutuses, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kunagi kinnitage toodet nõõri, paela, pitsi ega riiete külge. Kägistusoh!

Ärge kasutage pudelilutti imemisluti asemel.

Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelevalve all.

TOOTE OSAD


Joon 1. Rinnapumba osad

1. Lehtri kate
2. Silikoonist massaažipadi
3. Lehtrihoidik
4. Silikoonmembraan
5. Rinnapumba korpus
6. Kaas
7. Ühendusvooliku otsakud 4 tk
8. Vahelduvvooluadapter
9. USB-laadimiskaabel
10. Rinnapumba korpus ja pumpamiseadet ühendav voolik 2 tk
11. Juhtseade
12. Tagasivoolusulgur 3 tk
13. Alus
14. Pudel 1 tk
15. Keermetega vaherõngas
16. Lutt
17. Pudeli adapter
18. Skaalaga kork
19. Tihend
20. Ümbriskott


Display, fig. 2

1. LCD-ekraan
2. Aku laetuse taseme näit
3. Tööaja näit
4. Vaakumi vähendamise nupp
5. Vaakumi suurendamise nupp
6. Töörežiimi (stimuleeriva või süvitsi väljutava) indikaator
7. Vaigistusnupp
8. Imemistugevuse taseme näit
9. Toitelüliti
10. Töörežiimi (stimuleeriva või süvitsi väljutava) indikaator

LOVI ELEKTRILISE RINNA PUMBA KOKKUPANEK

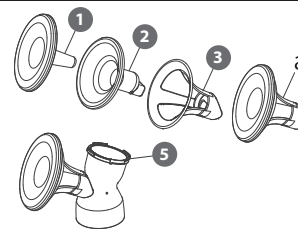

Asetage silikoonist massaažipadi (2) lehtrihoidikusse (3). Seejärel kinnitage lehtri kate (1), et moodustada element „a“. Tähtis! Veenduge, et padja servad sobivad ühtlaselt lehtrihoidiku servadega. Pange tähele, et mõlemad osad on profileeritud ning peaksid teineteisega korralikult ühenduma. Kinnitage element „a“ rinnapumba korpuse külge (5).

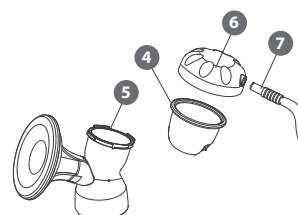

Asetage silikoonmembraan (4) rinnapumba korpusesse (5) ning katke see kaanega (6). Keerake kaas rinnapumba korpusele kõvasti kinni. Ühendage ühendusvooliku otsakud (7). Suruge vooliku otsakuid, et need tihedalt avadesse kinnituksid.