



Prolactis 3D^{SOFT}

Elektriline rinnapump



KASUTUSJUHEND

Fig. 1


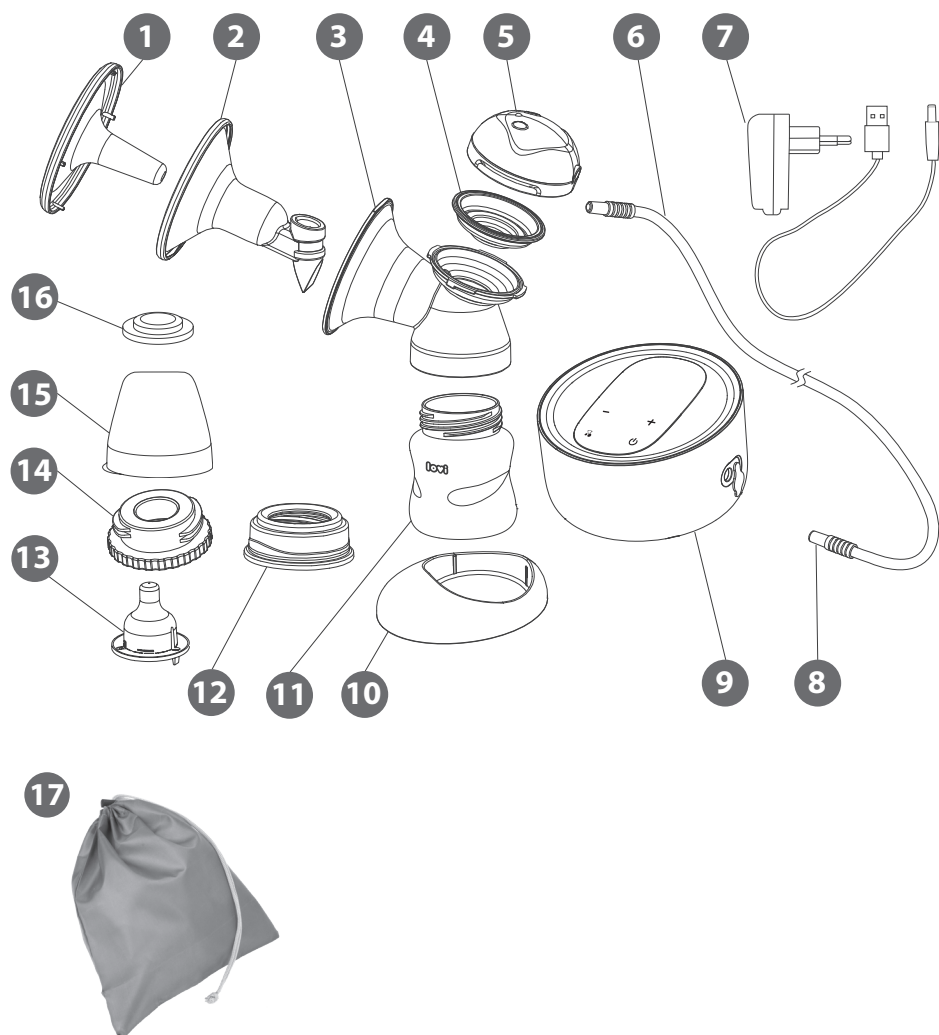


Fig. 2

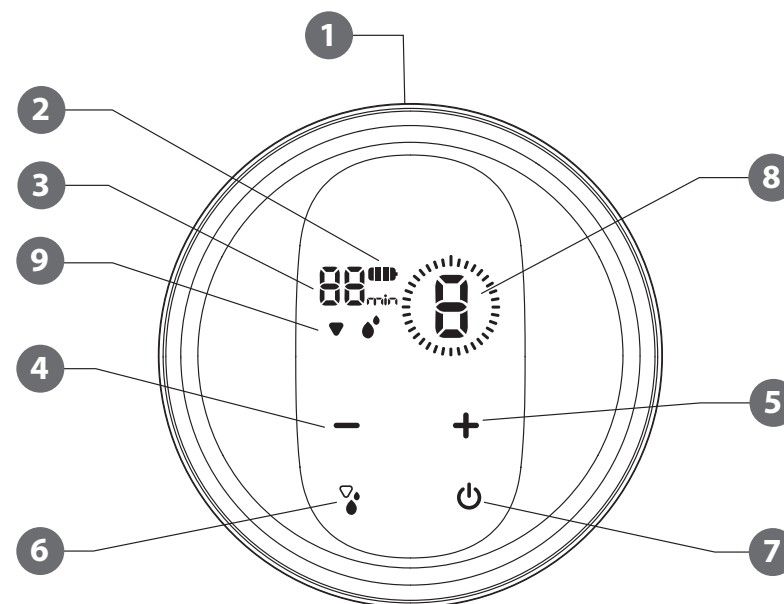

Canpol sp. z o.o.
 02-884 Warszawa,
 ul. Puławska 430, Poland.
 Biuro, sprzedaż:
 Słubica B, ul. Graniczna 4,
 96-321 Żabia Wola, Poland.
 tel. (+48 46) 858 00 00,
 fax: (+48 46) 858 00 01
 biuro@lovi.pl
 www.lovi.pl

ISO 9001, ISO 22716

KASUTUSJUHE

LOVI elektriline kahe töörežiimiga rinnapump

Palun lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Tähtis ohutusteave. Käesoleva kasutusjuhendi ja ohutusteabe eiramine võivad tuua kaasa terviseohu ja seadme rikke. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel ja viisidel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse vastaselt tehnilistele muudatustele ajakohastada.

SISSEJUHATUS
Õnnitleme teid LOVI elektrilise kahefaasilise rinnapumba ostmise puhul! LOVI rinnapump pakub asjatundlikku tuge imetamisprobleemide lahendamisel. Ideaalne abivahend olukordades, kus on vajalik sagedane rinnapiima sõõrutamine. Seade pakub tuge aktiivsetele töötavatele emadele, kes vajavad oma lapse rinnapiimaga toitmiseks alternatiivseid võimalusi. Võimaldab rinnapiima valutat, mugavat ja kiiret väljutamist. Rinnapumbal on imikute imemisrütmi inspireeritud kaheetapiline pumpamisrütm: stimuleeriv ja süütsi väljutav.
Stimuleerimisrežiim – imiteeritakse beebi kiireid imemisliigutusi, millega ta stimuleerib piima kogumist ja eritumist. Süütsi väljutusrežiim – imiteerib aeglasemat, sügavat ja tõhusamat imemist. Kui rinnapiim hakkab voolama, peab beebi imemiseks rohkem pingutama. Piim muutub aegamööda paksemaks (struktuurilt tihedamaks) ja toitvamaks, mistõttu imemise rütm ja tempo aeglustuvad.
LOVI rinnapumba töörütm ja võimsus on valitud selliselt, et see matkiks beebi loomulikke imemisrütmi ja selle muutumist rinnaga toitmise ajal. MÄRKUS: LOVI soovib rinnaga toitmist kui kõige tervislikumat imikute toitmiseviisi. Alternatiivset toitmismeetodit soovitate kasutada alles siis, kui rinnaga toitmine on võimatu või ebapiisav ning te olete oma arsti, ämmaemanda või apteekriga selle üle nõu pidanud. Rinnapiim on vastsündinutele ja imikutele kõige tervislikum ja väärtuslikum toit, mida soovitatakse lapse esimesel kuuel elukuul ainsa toiduna. Alates kuuendast elukuust peaks seda kombineerima tahke toiduga. <i>NB! Rinnapump ei ole mõeldud rinnapiima väljutamiseks siis, kui nälgine laps ei suuda ise rinda tühjendada, s.t juhul, kui teie rinnapiimakanalid on blokeeritud.</i>
KASULIKUD NÕUAND
Millal tuleks rinnapumpa kasutada? Kui võimalik, oodake laktatsiooni stabiliseerumist, mis toimub tavaliselt 2.–4. nädalal pärast sünnitust. Sellel reeglil on järgmised erandid. • Teie rinnades tekib väga palju piima ning need on tursunud ja pakitsevad (rindade ületäituvus). Väikese piimakoguse väljutamine enne rinnaga toitmist pakub teile kergendust ja aitab lapsel paremini nibu haarata. • Teie rinnanibud on pikaajalise imetamisvaheaja tõttu sisse tõmbunud. • Teil on nõgusad, lamedad või kahjustunud rinnanibud (rinnapumba kasutamine võib rinnanibu kuju korrigeerida). • Lapse toitmise vaheajal hakkab rinnast piima erituma ja te ei soovi last äratada. • Laps on haige ega taha rinda võtta. • Teie rinnades on vähe piima – rinnapumba kasutamine imetamise vaheaegadel aitab piimateket suurendada. • Kui te käite tööl või olete kodunt eemal, kuid soovite rinnaga toitmist jätkata, peaksite loomuliku laktatsiooniprotsessi säilitamiseks regulaarselt kasutama rinnapumpa.

Kui sageli peaks rinnapiima väljutama?

Kui te ei saa ajutiselt rinnaga toita, on soovitatav kasutada rinnapumpa vähemalt kaheksa korda päevas. See hoiab rinnapiima tekke sobival tasemel. Algul võib olla teie jaoks raske suuremas koguses piima saada, kuid mõne päeva möödudes olete võimeline rohkem piima väljutama. Isegi stabiilse laktatsiooni korral ei ole ühe seansiga väljutatava piima kogus suur (30–60 ml), seetõttu võib ühe portsjoni piima kogumiseks vaja minna mitut seanssi.

TOOTEKIRJELDUS

Rinnapump, mudel nr XN/MD-2253A

Elektriline rinnapump (edaspidi rinnapump) on seade, mis on mõeldud imetavatele emadele rinnapiima väljutamiseks. Võimaldab piima kogumist hilisemaks kasutamiseks, näiteks siis, kui viibite mõnda aega lastest eemal. Rinnapump aitab laktatsiooni säilitada ja olla valmis kavandatud eemalolekuteks või ootamatuteks olukordadeks, nagu ravil viibimine või rinnanibude valulikkus ja lõhenemine.



- Seade on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.
- Seadme garantiiaeg on kaks aastat.
- Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit ja pidage kinni ohutusreeglitest.
- Hoidke kasutusjuhendit seadme juures.
- Toote oodatav kasutusiga on kaks aastat.
- Toote silikoonosade värvus võib jäädvalt muutuda. Need tooteosad tuleks luitumise korral või teatud kasutusaja möödumisel välja vahetada.

Järgige seadme ja selle lisatarvikute õige kasutamise juhiseid. Ärge kunagi kasutage kahjustunud, puuduvate osadega või katkist seadet. Kahjustunud või kulunud osad tuleb kohe asendada. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mille põhjus on kasutusjuhiste ja õige kasutusviisi eiramine. Ükski seadme väärast kasutamisest põhjustatud kahjustus ei saa olla kaebuse ega garantiiremondi alus. Seadme remontimine või ümberehitamine volitamata isikute poolt võib tühistada garantii ning sellega võib kaasneda oht elule ja tervisele.




ÜLDISED OHUTUSREEGLID

- Kui teil on rinnaga toitmisel probleeme või kui lapse imetamine tekitab valu, peaksite enne rinnapumba kasutamist meedikuga nõu pidama.
- Rinnapumba esmakordsel kasutamisel oleks seda parim teha spetsialisti jälgimisel.
- Soovitame lugeda vastavasulist kirjandust ja tutvuda imikute toitmise põhimõtetega.


NB! Ebapiisav imemistugevus (pumpamissurve) võib vähendada väljutatava piima kogust, kuid liiga suur imemistugevus võib piima väljutamisel põhjustada rinna valulikkust ja vähendada piima teket. Kui teil tekib üks või teine nimetatud probleemidest, reguleerige rinnapumba imemistugevust (vt IMEMISTUGEVUS).

- Hoidke seade puhtana. Vältige tolmu ja muu mustuse kogunemist, mis võivad toote kasutusomadusi kahjustada.
- Hügieeni eest hoolitsemine on ema ja beebi ohutuse tagamiseks hädavajalik.
- Seadme osi, mida ei ole võimalik pesta, tuleb vee ja niiskuse eest kaitsta.

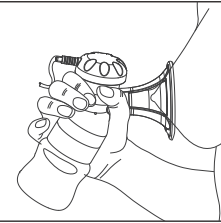

1. Asetage rinnapump rinnale nii, et rinnanibu jääb sügavale leetri sisemusse (täpselt keskele).

NB! Silikoonpadi peab tihedalt vastu rinda liibuma: vastasel korral võib imemistugevus jääda liiga väikeseks.

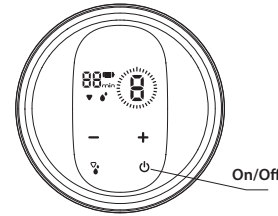

2. Rinnapumbal on puutekraan. Piima väljutamise alustamiseks puudutage lülitiikooni. Kuulete piiksvat heli, mis kostab iga kord, kui juhtpaneeli seadistus muutub.

3. Samal ajal alustab pump 30 minuti loendamist. Kui taimer on loendanud 30 minutit, lülitub mootor välja. Kui puudutate piima väljutamise ajal toitelüliti ikooni, lülitub pump välja. Teistkordse puudutuse järel alustab seade uuesti loendamist. Rinnapump käivitub ja alustab tööd stimuleerimisfaasis esimesel võimsustasemel.

4. Stimuleerimisfaasi imemistugevuse reguleerimiseks vastavalt oma vajadustele puudutage pluss- (+) või miinusmärgiga (-) ikooni.

5. Stimuleerimisfaasis on võimalik valida üheksa tugevustaseme vahel.

6. Kui soovite minna üle süvitsi väljutamise faasi, vajutage tilkade kujutisega nuppu .

7. Imemistugevuse reguleerimiseks süvaväljutusfaasis puudutage pluss- (+) või miinusmärgiga (-) ikooni. Süvaväljutusfaasist tagasi stimuleerimisfaasi minekuks puudutage juhtpaneelil uuesti sama nuppu .

8. Kui soovite stimuleerimisfaasi vahele jätta või kui piim hakkab varem voolama, puudutage faasi muutmiseks  nuppu.


9. Kui olete lõpetanud, puudutage toitelüliti ikooni ja rinnapump lülitub välja.

HOIATUS! Enne rinnapumba rinnalt eemaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud. Vajadusel saate rinnapumba pumpamise ajal kõrvale panna, kui lükkate sõrme massaažipadja ja rinna vahele (nii, nagu teete last rinnalt eemaldades).

HOIATUS! Rinnapump lülitub 30 minuti möödumisel automaatselt välja, olenemata sellest, kas seda on pumpamise ajal seadistatud.

Kui olete valinud imemistugevuse taseme (ükskõik kas stimuleerimis- või süvaväljutusfaasis), salvestub valik rinnapumba mälu kuni väljalülitamise või seade muutmiseni. Kui te järgmisel korral pumba uuesti sisse lülitate, alustab see tööd stimuleerimisfaasi esimesel tugevustasemel. Kui piima hakkab sattuma massaažipadja alla, vähendage imemistugevust, kuni piim hakkab uuesti pudelisse voolama.

TOITEVALIKUD

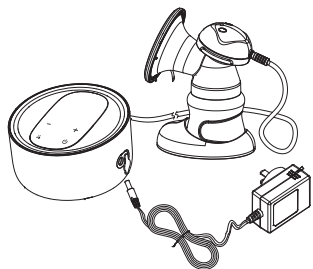

Vahelduvvooluadapteri kasutamine - sisestage adapteri otsak juhtseadmel olevasse ühenduspesa ja pistik seinakontakti.

Rinnapumba vahelduvvooluadapter on 5V 1A. Vahelduvvooluadapteri tihvtid võivad riigiti erineda. Soovitav on kasutada rinnapumbaga kaasas olevat originaal vahelduvvooluadapterit. Kuid enamik mobiiltelefonidaptereid on ka 5V 1A või 5V 2A. Neid saab ühendada rinnapumba USB-kaabliga. See võib rinnapumba kahjustada kui adapter on üle 5V. NB! Enne teise adapteri kasutamist pöörake esmalt tähelepanu selle pingele. Eeltoodu puudutab riike, kus ELi adapter (mis on komplektis) ei tööta.

Liitium-ioonaku kasutamine. Akut laetakse vahelduvvooluadapteri kasutamisel. Laadimine võtab aega umbes kolm tundi.

NB! Enne seadme esimest kasutamist laadige aku täis. Täislaetud aku võimaldab pumbal töötada umbes ühe tunni (umbes 2/3 sessioonidest). Rinnapumba kasutusea pikendamiseks laadige akut enne, kui see on täielikult tühjenenud. Kui seade on akutoitel, kuvatakse ekraanile aku laetuse tase sellisena, nagu ta ajas muutub. Aku tühjenemisel kuulete piiksuvat heli ja ikoon hakkab vilkuma. Kasutatud akut saab asendada ainult tootja volitatud teeninduskeskuses.

KASUTUSJUHISED

Enne iga kasutamist:

- peske käed korralikult puhtaks;
 - veenduge, et rinnapump on pestud ja kuivanud, kui ei, siis järgige allpool esitatud juhiseid.
 - Veenduge, et ei oleks vedelikku ega niiskust. Ärge kunagi lülitage pumpa tööle, kui märkate voolikus veejälgi.
- NB! Ärge puhuge vee eemaldamiseks voolikusse!

NB! Enne rinnapumba kasutamist kontrollige aku laetuse taset. Kui aku on tühi, ühendage juhtseadmega vahelduvvooluadapter ning laske aku täis laadida.

Kõrvaolev tähis näitab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vältimaks kontrollimatust jäätmekäitlusest tekkivat kahju keskkonnale ja inimeste tervisele, käideldge toodet vastutustundlikult, aidates kaasa materjalide säästlikule taaskasutusele. Toote ringlusevõttu puudutava info saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või toote tarnija poole.



Tootja deklareerib, et käesolev toode vastab Euroopa Liidu direktiividele ja ühtlustatud standarditele. Toode on läbinud vastavushindamise menetluse.



Toode vastab teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete direktiivi (LVD) 2014/35/EL, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (EMC) 2014/30/EL ning elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatavate ohtlike ainete kasutusnõuete direktiivi (RoHS) 2011/65/EL sätetele.

Tegemist on II klassi seadmega.



HOIATUS! See toode ei ole mänguasi. Hoidke selle osi lastele kättesaamatus kohas! Hoidke kasutusjuhend alles, kuna see sisaldab olulist teavet. Toote partiikood on pakendil.

TOOTE VÄÄRKASUTUS

- Ärge kasutage toodet, kui sellel on märke kahjustustest.
- Ärge kunagi kasutage toodet vannis olles!
- Ärge kunagi kasutage toodet kohas, mis on avatud kokkupuutele veega, näiteks vanni, kraani- või pesukausi või duši läheduses.
- Ärge kasutage toodet, kui olete nii väsinud, et võite selle kasutamisel magama jääda.
- Ärge kunagi ühendage toodet vahelduvvooluadapteriga õues viibides.
- Ärge mingil juhul kasutage katkise juhtmega vahelduvvooluadapterit. Kahjustunud adapterit võib parandada ainult tootja volitatud teeninduskeskuses.
- Ärge kunagi kasutage toodet kasutustingimuste ja -otstarbe vastaselt.
- Ärge müüge kasutatud toodet edasi.

SEADME SPETSIFIKATSIOONID

Akutoide:	3,7 V liitium-ioonaku, mahtuvusega 1100 mAh
Toide vooluvõrgust:	vahelduvvool, 100–240 V / 50/60 Hz
Maksimumvõimsus:	5 W

TOOTE OSAD


Joon 1. Rinnapumba osad

1. Lehtri kate
2. Silikoonist massaažipadi tagasivoolu tõkestavate ventiilidega, 2 tk
3. Rinnapumba lehriga korpus
4. Silikoondiafragma
5. Kaas
6. Rinnapumba korpust ja pumpamisasetet ühendav voolik, 2 tk
7. Vahelduvvoolu toide (USB)
8. Ühendusvooliku otsakud, 4 tk
9. Juhtseade
10. Alus
11. Lutipudel, 1 tk
12. Keermetega vaherõngas
13. Lutt
14. Lutipudeli adapter
15. Rõngastihend
16. Tihend
17. Ümbriskott


Joon 2. Ekraan

1. LCD-ekraan
2. Aku laetuse taseme näit
3. Tööaja näit
4. Vaakumi vähendamise nupp
5. Vaakumi suurendamise nupp
6. Töörežiimi (stimuleeriva või süvitsi väljutava) indikaator
7. Toitelüliti
8. Imemistugevuse taseme näit
9. Töörežiimi (stimuleeriva või süvitsi väljutava) indikaator

LOVI ELEKTRILISE RINNAPUMBA KOKKUPANEK

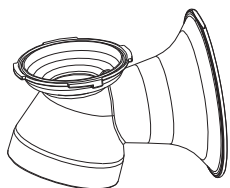


Võtke rinnapumba lehriga korpus kätte, nagu fotol näidatud – keermega ava ülalpool.

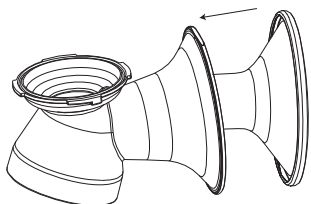


Asetage ventiiliga silikoonmassaažipadi (2) lehrisse, suunates ventiili lehtri poole. Seejärel kinnitage ventiil ettevaatlikult rinnapumba korpuse külge, surudes seda õrnalt allapoole. Asetage massaažipadi lehrile ja veenduge, et selle servad liubuvad ühtlaselt lehtri servadele. Pange tähele, et mõlemad osad on profileeritud ning peaksid teineteisega korralikult ühenduma. NB! Tagasivoolu tõkestava ventiiliga massaažipadja ühendamisel lehriga vältige jõulist survet.




Keerake lutipudeli adapter (14) pudeli külge ning seejärel lutipudel rinnapumba korpuse külge.

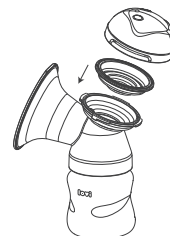


Asetage rinnapumba korpuse avale silikoondiafragma. Seejärel katke rinnapumba korpus kaanega, keerates seda kellaosuti liikumise suunas nii, et ühendusvooliku otsaku jaoks mõeldud ava jääb lehtri vastasküljele.

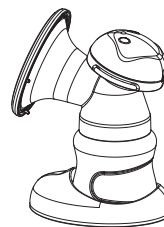

Asetage kokkupandud seade alusele (10).

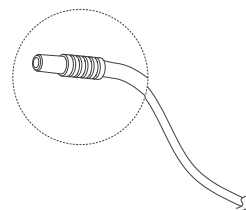

Ühendage vooliku otsakud (8) voolikuga (6), surudes nende peenemad otsad voolikusse. Veenduge, et osad kinnituksid tihedalt.

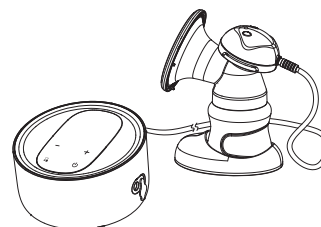

Ühendage voolik rinnapumba korpuse ja juhtseadmega. Pistke üks otsakutest kaanes olevasse avasse ja teine juhtpaneelil asetsevasse ühenduspesa. Suruge vooliku otsakuid, et nad tihedalt avadesse kinnituksid.